



mm	Pack size open	Pack size close	Cut die type	Product code
	160,0 x 210,0			16389
Colors				
<input checked="" type="checkbox"/> Black	<input checked="" type="checkbox"/> Cut-Die			
Correction Date				
No. 2 - 15/03/2023	Approval		Min Text Size	Body Text Size
			6 pt	9 pt

The colours are indicative.

Flamigel®

Indications

Flamigel® est un gel hydroactif colloïdal destiné au traitement des petites plaies, qui favorise la cicatrisation rapide de la peau en couvrant la plaie et en constituant un milieu humide propice à la cicatrisation. **Flamigel®** est utilisé après un traitement au laser thérapeutique et sert à traiter les brûlures superficielles (également celles induites par la radiothérapie) et les petites plaies (par exemple écorchures, coupures). **Flamigel®** peut également être utilisé sur les plaies ouvertes superficielles.

Propriétés

La formule hydroactive colloïdale de **Flamigel®** contribue à apaiser rapidement la douleur causée par les petites plaies grâce à son effet rafraîchissant. **Flamigel®** contribue à créer des conditions de cicatrisation optimales afin d'accélérer le renouvellement des cellules. Ainsi, la plaie cicatrise plus rapidement et le risque de formation de cicatrices est réduit. **Flamigel®** forme une couche protectrice sur la plaie et la protège contre toute contamination externe.

Flamigel® peut être utilisé sur les plaies sèches ou humides :

- Dans le cas d'une plaie sèche, **Flamigel®** hydrate la plaie (effet « hydrogel »). Celle-ci absorbe l'eau contenue dans **Flamigel®**, ce qui favorise la dissolution des tissus nécrosés/lésionnés.
- Dans le cas d'une plaie suintante, l'hydrocolloïde contenu dans **Flamigel®** est activé. Le gel absorbe l'excès d'exsudat et rétablit et maintient l'équilibre hydrique dans la plaie (effet « hydrocolloïde »).

Mode d'emploi

Lavez-vous les mains avant et après le traitement de la plaie. Nettoyez et séchez délicatement la plaie avant d'appliquer le gel.


Pour les brûlures superficielles et les petites plaies (par exemple écorchures, coupures) : Appliquez soigneusement **Flamigel®** sur la plaie (sans frotter) une ou deux fois par jour (en cas de coups de soleil, appliquez deux à six fois par jour). Si nécessaire, recouvrez la plaie d'un sparadrap ou d'un pansement, à changer tous les jours.

Pour les plaies ouvertes superficielles : Appliquez une couche épaisse (5 mm) de **Flamigel®** sur la plaie en évitant les bords de la plaie. Recouvrez **Flamigel®** d'un pansement non adhésif stérile et le maintenir avec de la gaze ou un bandage. Laissez **Flamigel®** aussi longtemps que la structure du gel restera intacte. Lorsque de nouvelles cellules cutanées commencent à se former et que la plaie se referme petit à petit, appliquez une fine couche de **Flamigel®** pour éviter la macération. Si nécessaire, protégez les bords de la plaie.

Plaies ouvertes : changez le pansement tous les jours.



Nettoyer

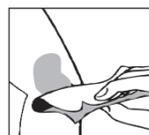

Sécher



Appliquer



Recouvrir

Retrait du gel :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir retiré **Flamigel®**.
- **Flamigel®** peut être retiré simplement et sans douleur à l'aide d'une gaze humide.

Précautions

- Pour usage externe.
- Les effets indésirables tels que les irritations ou les réactions allergiques sont rares.
- N'utilisez pas **Flamigel®** en cas de réaction allergique connue aux parabènes ou à l'un des composants.
- N'utilisez pas **Flamigel®** sur les paupières ou dans les yeux. Si **Flamigel®** entre en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau courante et consultez un médecin.
- Pour les plaies très suintantes ou infectées, consultez un médecin avant d'utiliser **Flamigel®** car d'autres traitements complémentaires pourraient être requis.
- Si la plaie enfle, rougit ou devient douloureuse, ou s'il n'y a pas de début de cicatrisation après quelques jours, consultez un médecin.

Arrêtez immédiatement d'utiliser **Flamigel®** si vous remarquez une irritation ou si vous semblez allergique.

En cas d'incident grave lié à ce dispositif ou d'aggravation de vos symptômes, veuillez contacter votre médecin ou pharmacien. Cet incident doit être signalé à Flen Health et aux autorités compétentes de votre pays (le distributeur, voir ci-après, peut vous renseigner à ce sujet). En signalant un incident, vous pouvez aider à fournir de plus amples informations sur la sécurité et l'efficacité de ce dispositif médical.

Conditions de conservation

- Conservez à température ambiante (< 25°C), dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine.
- Refermez le tube après utilisation.
- Après ouverture, s'il est rebouché correctement, le tube de **Flamigel®** peut être conservé et utilisé pendant un an.

- N'utilisez pas **Flamigel®** après la date d'expiration indiquée sur l'emballage. La date d'expiration (USE BY: année/mois) fait référence au dernier jour du mois et de l'année indiqué.

Ingrédients

Hydrocolloïde, arginine, eau purifiée, macrogol, acide gras à chaîne ramifiée (BCFA), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), EDTA-DiSodium.

 Flen Health NV/SA
Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich
Belgique

 Viatrix Médical
1 bis place de la Défense - Tour Trinity
F 92400 Courbevoie

Date d'apposition du marquage CE : avril 1998.
Date de révision de la notice : février 2023.

 0344 Dispositif médical

 Peut être utilisé pendant 12 mois après ouverture

 gel