



**JEUK
=
ERGER DAN PIJN***


extracalm[®]

anti-jeuk gelspray

Voor jeukende, pijnlijke, rode of geïrriteerde huid¹ zoals:

- ouderdomsjeuk
- insectenbeten
- droge huid
- dermatologische ingrepen (bv. peeling, laserbehandeling)
- allergische reacties door contact met bepaalde stoffen
- symptomatische jeuk van ongekende oorsprong

Temperatuur van de huid na het aanbrengen van Extracalm[®]

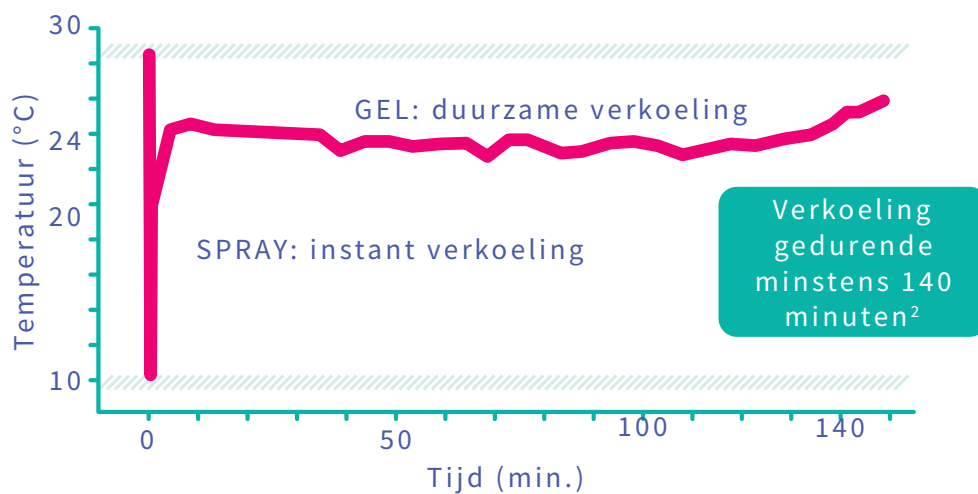

Extracalm[®] is doeltreffend op 4 niveaus



1 Niet bij open wonden

2 Flen Health. Extracalm cooling test, 2009 (data on file).


Voordelen

- Extracalm® wordt snel door de huid geabsorbeerd, inwrijven hoeft niet.
- zonder cortisone
- gebruiksvriendelijk:
snel & geen vieze handen
- bewaring op kamertemperatuur



1

Schud de spuitbus.

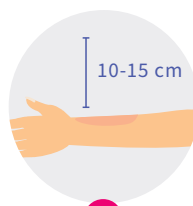

2

Houd de spuitbus 10 tot 15 cm van de huid.



3

Houd de spuitbus rechtop en spuit tot de te behandelen huid helemaal bedekt is.

Extracalm® doorbreekt de jeuk-krab cyclus



CE 0344

150 ml



www.extracalm.com
www.flenhealth.com