

A close-up portrait of an elderly woman with short, wavy white hair and blue eyes, smiling gently. To her right is a white line-art icon of a hand with fingers spread, with a plus sign above it and a starburst symbol on the palm, representing hygiene or medical care.

**Un traitement des plaies
adéquat commence par
un bon nettoyage**

Les différentes étapes d'un traitement des plaies adéquat




Pourquoi nettoyer ?



Flamirins®

Nettoyage mécanique

Choix entre **deux positions** :

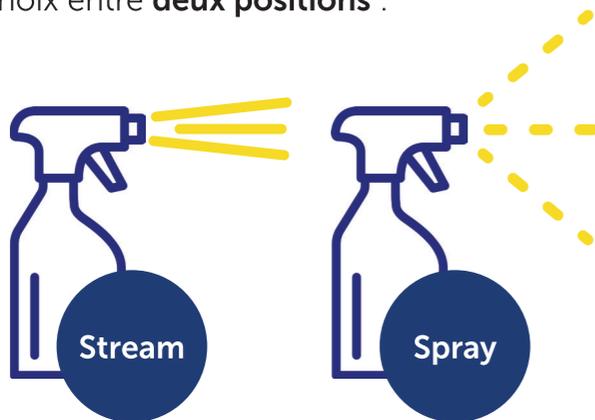

Jet puissant

Jet large et doux

Composition

- ▶ **Solution isotonique** : ne pique pas
- ▶ **Contient du polysorbate** : réduit les tensions superficielles entre les fluides et le lit de la plaie, ce qui favorise le débridement mécanique lors du nettoyage
- ▶ **Contient de l'acide citrique** : un pH acide ralentit la propagation des bactéries



Comment l'utiliser ?



Tournez la tête de pulvérisation en mode « Spray » ou « Stream » (jet) en appuyant en même temps vers le haut sur la languette sous la tête de pulvérisation.



Pulvérisez le liquide dans la plaie. Utilisez du papier absorbant pour essuyer l'excès de Flamirins®.



Séchez la plaie en la tamponnant délicatement.



Placez la tête de pulvérisation en **position « Stop ».**

Flamirins® en bref

- 1 En rinçant la plaie avec Flamirins®, vous réduisez le risque d'infection.
- 2 Flamirins® est **facile d'emploi** (ne demande pas une longue application).
- 3 Flamirins® **nettoie en rinçant**, en position spray ou jet.
- 4 Flamirins® au pH acide soutient le **processus de cicatrisation**.
- 5 Flamirins® contient du **polysorbate** dont les micro-organismes peuvent être facilement éliminés.



Informations de commande : Flamirins® 250 ml
Code CNK : 1409-374 - N° art. : 1102

Gamme de produits

Une solution complète pour tous les types de plaies à chaque étape de cicatrisation



Nettoyer

- ▶ Solution isotonique, pH acide
- ▶ Aucune irritation, ne pique pas
- ▶ Le spray évite de devoir frotter dans la plaie



Plaies superficielles

- ▶ Effet rafraîchissant **rapide et de longue durée**
- ▶ **Barrière** contre les contaminations externes



Plaies superficielles ou profondes à exsudat léger à modéré

- ▶ **Alginate gel** avec système enzymatique unique



Plaies superficielles ou profondes à exsudat modéré à important



 **Flen Health**

Flen Health NV
www.flenhealth.com
info@flenhealth.com